


Tecnología de Depilación Laser

# MEGASHAPE PRO

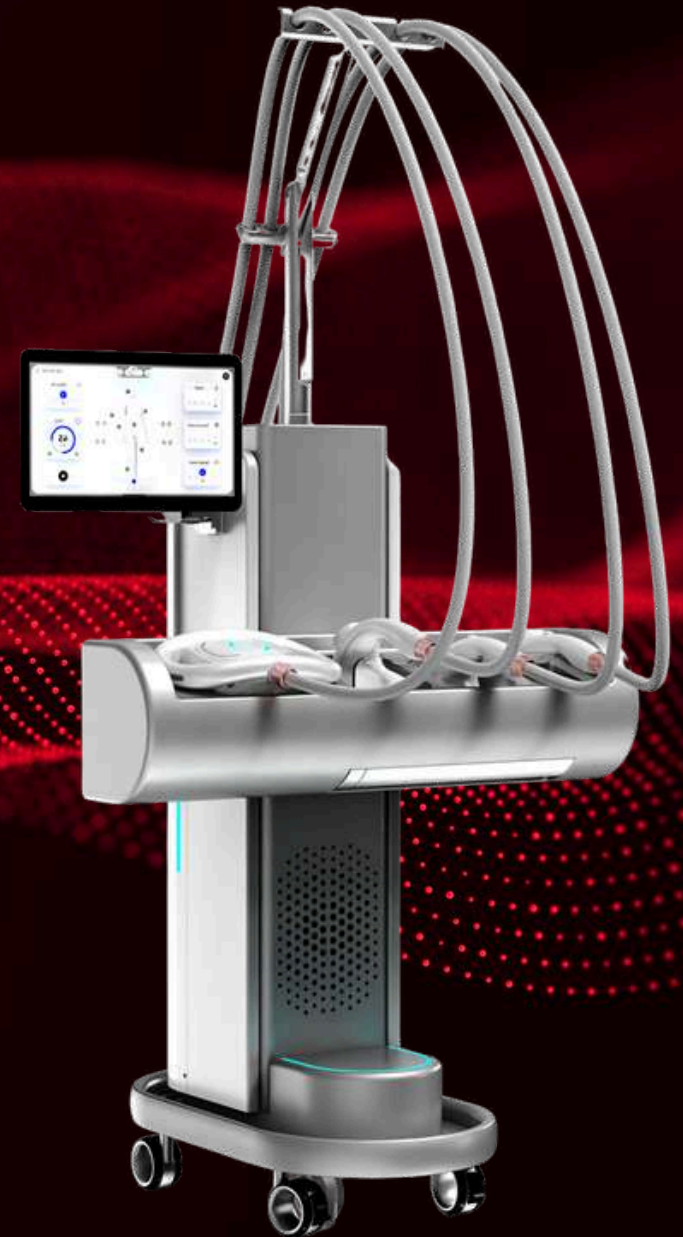

# DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

# MEGASHAPE PRO

La tecnología del Megashape Pro combina diferentes sistemas estéticos avanzados como radiofrecuencia, vacío, cavitación, rodillos y láser infrarrojo para trabajar de manera integral la reducción de grasa localizada, la reafirmación de la piel y la mejora de la celulitis. Su acción estimula la circulación, el metabolismo y la producción de colágeno, ayudando a moldear el cuerpo y mejorar la apariencia de la piel de forma no invasiva y segura.

# ¿CÓMO FUNCIONA?

## PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO:

- El Megashape Pro funciona mediante la combinación de tecnologías como radiofrecuencia, vacío, cavitación, rodillos y láser infrarrojo, las cuales actúan sobre las capas profundas de la piel y el tejido graso. Estas energías generan calor controlado y estimulación mecánica para favorecer la circulación, activar el metabolismo y estimular la producción de colágeno.

## MECANISMO DE ACCIÓN:

- La tecnología ayuda a descomponer la grasa localizada, mejorar el drenaje linfático y tensar la piel mediante calor y masaje profundo. Además, el vacío y los rodillos estimulan el movimiento del tejido, mientras la radiofrecuencia y el láser infrarrojo trabajan en la reafirmación cutánea y reducción de la celulitis, logrando una piel más firme, lisa y tonificada.

# ACCESORIOS BÁSICOS



Rodillo  
de vacío



RF  
multipolar



RF bipolar



Cavitación

# MEGASHAPE PRO

## ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Especificación	Detalle
Tecnología	Vacío + RF Bipolar + RF Multipolar + Cavitación + Rodillos + Láser 940nm
Pantalla	Táctil inteligente de 13.3"
Potencia RF	Hasta 30W ajustables
Rango de Vacío	0 – 75 kPa
Temperatura	40°C – 45°C

Velocidad de Rodillos	Ajustable en diferentes niveles
Longitud de onda	Láser infrarrojo 940nm
Voltaje	110V / 220V – 50/60Hz
Aplicaciones	Reducción de grasa, reafirmación y moldeamiento corporal
Piezas de mano	Cavitación, RF bipolar, RF multipolar y rodillo de vacío

## CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

- Tecnología multifuncional 5 en 1 para tratamientos corporales integrales.
- Permite ajustar parámetros como vacío, temperatura, RF y velocidad según la necesidad del paciente.
- Sistema de trabajo no invasivo y seguro para diferentes zonas corporales.
- Combina acción térmica y mecánica para optimizar los resultados estéticos.
- Pantalla táctil inteligente para un control preciso y personalizado del tratamiento.
- Diferentes piezas de mano para trabajar grasa localizada, flacidez y celulitis.

## BENEFICIOS CLÍNICOS

- Ayuda a reducir grasa localizada y moldear el contorno corporal.
- Mejora la firmeza y elasticidad de la piel.
- Disminuye la apariencia de la celulitis y piel de naranja.
- Estimula la circulación sanguínea y el drenaje linfático.
- Favorece la producción natural de colágeno y elastina.
- Brinda tratamientos cómodos, seguros y sin tiempo de recuperación.




## SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- El equipo debe ser operado únicamente por profesionales capacitados.
- No utilizar en pacientes embarazadas, con marcapasos, implantes metálicos o enfermedades cardíacas.
- Evitar el tratamiento sobre heridas abiertas o piel irritada.
- Ajustar siempre la energía y el vacío según la tolerancia del paciente para evitar molestias o quemaduras.
- Mantener las piezas de mano en contacto adecuado con la piel durante el tratamiento.
- Verificar que todos los manípulos estén correctamente conectados antes de iniciar la sesión.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Limpiar y desinfectar las piezas de mano después de cada tratamiento con alcohol o productos adecuados.
- Mantener el equipo en un lugar seco, limpio y ventilado.
- Revisar periódicamente los filtros, conexiones y anillos de sellado del sistema de vacío.
- Evitar golpes o caídas en las piezas de mano y accesorios.
- Apagar y desconectar el equipo después de cada jornada de trabajo.
- Realizar mantenimientos preventivos periódicos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

# MÉTODO DE ACCIONAMIENTO

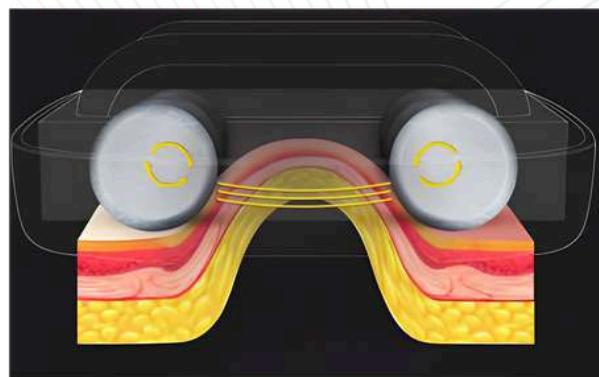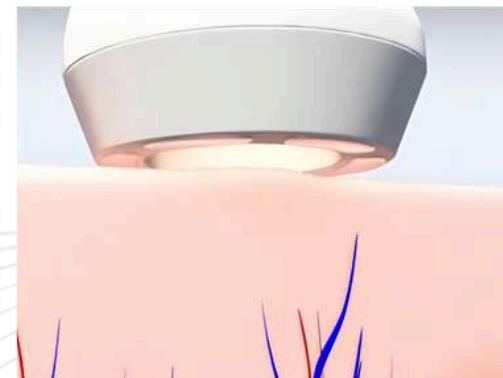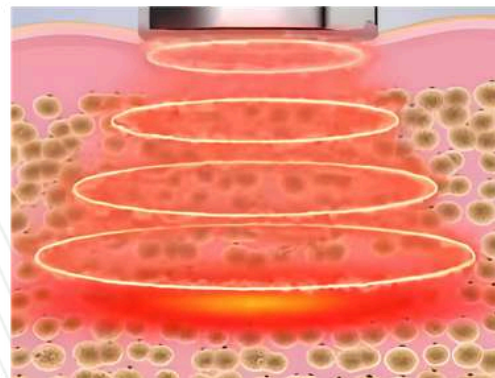



# SESIONES

Generalmente, las sesiones tienen una duración aproximada de 15 a 40 minutos, dependiendo del área tratada como abdomen, espalda, brazos, muslos o glúteos. Se recomienda realizar entre 6 y 10 sesiones para obtener resultados más visibles y duraderos, dejando intervalos de 3 a 7 días entre cada sesión. Durante el procedimiento, el paciente experimenta una sensación de calor y masaje profundo que ayuda a estimular la circulación, mejorar el drenaje linfático y favorecer la reducción de grasa localizada y la reafirmación de la piel. Gracias a su tecnología no invasiva, el tratamiento permite reincorporarse inmediatamente a las actividades diarias sin tiempo de recuperación.

# RESULTADOS



ANTES

DESPUES

# RECOMENDACIONES POSTRATAMIENTO

- Mantener una buena hidratación para favorecer la eliminación de toxinas y grasa.
- Evitar alimentos altos en grasa y aumentar el consumo de agua.
- No exponerse al sol ni utilizar calor excesivo el mismo día del tratamiento.
- Evitar saunas, baños calientes o ejercicio intenso durante las primeras 24 horas.
- Utilizar crema hidratante o productos recomendados por el profesional.
- Complementar el tratamiento con hábitos saludables para potenciar los resultados.