




LINEA CORPORAL

MULTIFUNCIONAL ROSADO

MULTIFUNCIONAL ROSADO

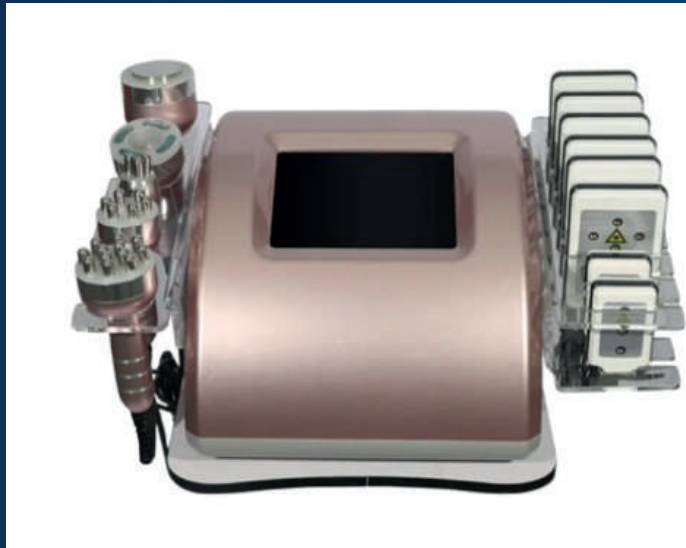

DESCRIPCIÓN

El MULTIFUNCIONAL ROSADO (sin pedestal) es un equipo de estética de última tecnología, diseñado para tratamientos faciales y corporales no invasivos. Combina tres tipos de radiofrecuencia (RF), cavitación y lipólisis láser, proporcionando soluciones efectivas para rejuvenecer la piel, reducir grasa localizada y tonificar el cuerpo. Estimula la producción de colágeno, mejora la firmeza y elasticidad, y reduce arrugas y líneas de expresión, logrando un aspecto más juvenil. Su tecnología también ayuda a disminuir la celulitis, mejorar la textura de la piel y aumentar la circulación sanguínea. Fabricado con piezas de aluminio, ofrece gran durabilidad, y su sistema operativo intuitivo asegura un manejo sencillo. Es ideal para clínicas estéticas que buscan un equipo compacto, eficiente y sin necesidad de pedestal. Con una potencia de 200W y múltiples frecuencias especializadas, este dispositivo se adapta a diferentes necesidades, siendo una herramienta integral para el cuidado facial y corporal.

ANÁLISIS Y USO



Aplicación del Tratamiento Facial

Use el cabezal de RF facial para estimular colágeno y tratar arrugas. Realice movimientos circulares suaves en las áreas a tratar, evitando zonas sensibles como los ojos.

Tratamiento Corporal con RF

Seleccione el cabezal twelvepolar o sixpolar para tonificar y mejorar la textura de la piel. Trabaje en áreas específicas como abdomen, brazos o piernas, aplicando movimientos firmes pero controlados.

Uso de Cavitación

Aplique el cavitador en áreas con grasa localizada. Realice movimientos lentos y uniformes, manteniendo contacto constante con la piel para garantizar resultados efectivos.

Lipólisis Láser

Coloque las almohadillas de láser en las zonas a tratar. Ajuste la intensidad y la duración del láser según las recomendaciones del manual y el nivel de tolerancia del paciente.

Monitoreo Durante la Sesión

Observe la respuesta de la piel y el nivel de comodidad del paciente. Ajuste los parámetros si es necesario para mantener un tratamiento seguro y efectivo.

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Beneficios

- Rejuvenecimiento Facial
- Modelado Corporal
- Reducción de Celulitis
- Mejora de la Textura Cutánea
- Tratamientos No Invasivos

Resultados:

Resultados Inmediatos:


Mejora en la textura y luminosidad de la piel después de la primera sesión.
Sensación de firmeza y tonificación en las áreas tratadas.

Resultados a Mediano Plazo:

Reducción visible de arrugas y líneas finas tras varias sesiones.
Pérdida de centímetros en áreas con grasa localizada.

Resultados a Largo Plazo:

Reafirmación y rejuvenecimiento progresivo de la piel.
Contorno corporal más definido y reducción sostenida de celulitis.

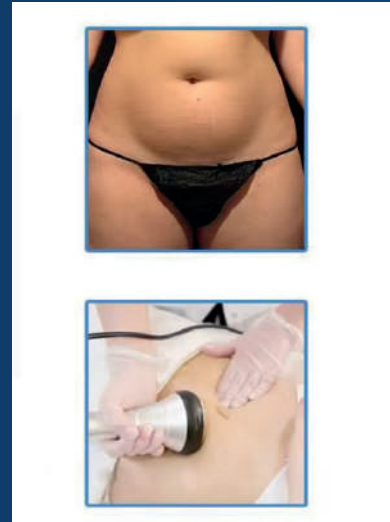



MULTIFUNCIONAL ROSADO

Especificaciones Técnicas

*Frecuencias de
Radiofrecuencia (RF)*

RF Facial: 4MHz
 RF Twelvepolar: 4MHz
 RF Sixpolar: 4MHz
 RF con Vacío: 4MHz

Voltaje

110V / 50-60Hz

Potencia

200W

Succión al vacío

100kpa

*Temperatura de
trabajo*

10°C - 35°C

*Frecuencia de
Cavitación*

Cavitador de 40kHz

Peso Bruto

20KG.

Tamaño del Paquete

46X46X46 cm



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec