



LINEA CORPORAL

**CELLUSPHERA**

# CELLUSPHERA

---



## DESCRIPCIÓN

*El Cellusphere es un equipo estético avanzado diseñado para tratar la celulitis y mejorar el contorno corporal de manera no invasiva. Combina tecnología de láser pulsado y micro vibraciones para descomponer la grasa localizada, mejorar la circulación sanguínea y estimular el drenaje linfático. Sus rodillos de silicona hipoalergénica aplican presión y vibración en áreas problemáticas como muslos, glúteos y abdomen, logrando una piel más tersa y suave.*

*Con una potencia de 300 W y velocidades de hasta 450 rpm, ofrece tratamientos efectivos y ajustables según las necesidades de cada paciente. Su diseño ergonómico facilita el manejo, permitiendo tratar diversas zonas del cuerpo con comodidad. Es una alternativa segura y eficiente a procedimientos invasivos, sin necesidad de tiempos de recuperación. Ideal para quienes buscan reducir visiblemente la celulitis, mejorar la textura de la piel y obtener resultados estéticos notables.*

# ANÁLISIS Y USO



## Configuración del equipo

Encienda el Cellusphere y seleccione los parámetros adecuados, como la velocidad de los rodillos (410 o 450 rpm) y la potencia del láser pulsado. Ajuste según las características del paciente y la zona a tratar.

## Inicio del tratamiento

Sostenga el mango ergonómico y aplique los rodillos de silicona sobre la piel con movimientos lentos y uniformes. Trabaje por secciones, manteniendo una presión constante para estimular la circulación y descomponer depósitos de grasa.

## Enfoque en áreas específicas

En zonas con mayor acumulación de grasa o celulitis, realice movimientos circulares o de vaivén para intensificar el efecto. Asegúrese de cubrir toda la zona tratada de manera uniforme.


## Monitoreo durante la sesión

Verifique que el paciente esté cómodo y que no haya molestias excesivas. Ajuste los parámetros si es necesario. Controle el tiempo de tratamiento, ya que cada área requiere entre 10 y 20 minutos dependiendo de su tamaño.

# BENEFICIOS Y RESULTADOS

## Beneficios

- Reducción visible de la celulitis
- Mejora de la circulación sanguínea
- Estimulación del drenaje linfático
- Piel más firme y suave
- Reducción de grasa localizada
- Tratamiento no invasivo

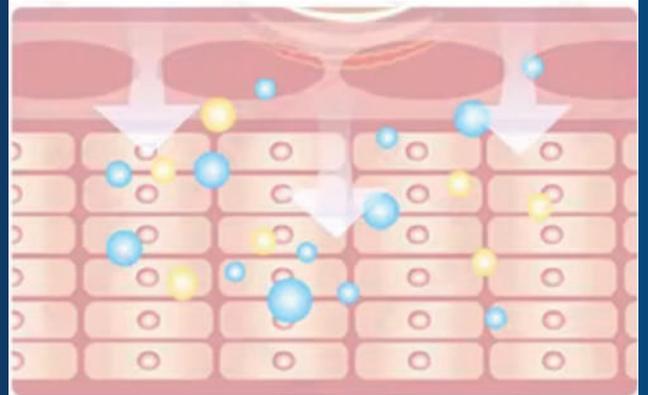

## Resultados:

### -A corto plazo:

Mejora inmediata en la textura de la piel, con una sensación de suavidad y firmeza. Reducción visible de la hinchazón gracias al drenaje linfático.

### -A mediano plazo (4-6 sesiones):

Disminución progresiva de la celulitis y un contorno corporal más definido. Incremento en la elasticidad de la piel y una apariencia más rejuvenecida.

### -A largo plazo:

Resultados sostenibles al combinar el tratamiento con una dieta equilibrada y actividad física. Mayor confianza y satisfacción con el aspecto corporal.





# CELLUSPHERA

## Especificaciones Técnicas

<i>Potencia</i>	300 W.	<i>Velocidades</i>	Mango pequeño: 410 rpm. Mango grande: 450 rpm.
<i>Materiales</i>	Cuerpo: ABS y acero inoxidable. Rodillos: Silicona hipoalergénica.	<i>Tecnología</i>	Láser pulsado combinado con micro vibraciones.
<i>Voltaje</i>	110V	<i>Peso Bruto</i>	26KG.
<i>Frecuencia</i>	50-60 Hz.	<i>Tamaño del Paquete</i>	58X50X63 cm
<i>Frecuencia de salida</i>	40-254Hz		



Cra 34a #38-15 Sur,  
Bogotá



313 -395-3827



@imec\_colombia



Imec